

# evigen 検査ガイド


## ○ 最初にご確認ください

同封されているもの




- ① evigenご購入の皆様へ(本紙)
- ② 遺伝子検査サービス evigen 説明書
- ③ evigen 遺伝子検査サービス申込同意書
- ④ Oragene® 唾液採取キット
- ⑤ 梱包用ビニール袋
- ⑥ 返送用封筒

## ○ 検査の流れ

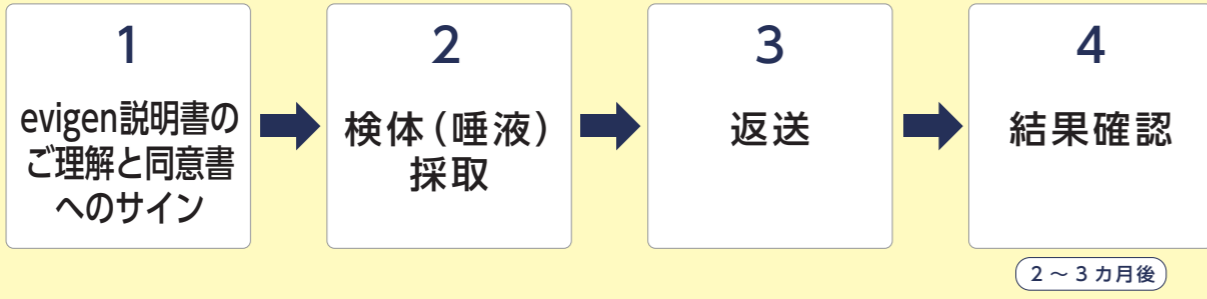

## 1. evigen 説明書のご理解と同意書へのサイン


付属の「遺伝子検査サービス evigen 説明書」をお読みいただき、内容を十分にご理解、ご確認の上、ご了承くださいましたら、「evigen 遺伝子検査サービス申込同意書」に必ず検査を受ける方ご自身が自筆でサインをご記入ください。申込同意書は2枚複写になっていますので、1枚目のジェノニクス返信用紙を切り取り、**[3. 返送]**の段階で、返送用封筒にご同封ください。

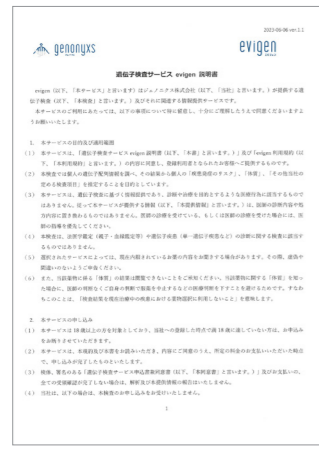

遺伝子検査サービス evigen 説明書

必ず、全8ページの説明書を読み、内容についてご理解いただけますよう、ご確認ください。ご不明点については、以下のメールサポートにお問い合わせください。  
問い合わせ窓口 [support@evigen.jp](mailto:support@evigen.jp)

evigen 検査サービスの内容と検査を受ける事にご同意いただけましたら、「evigen 遺伝子検査サービス申込同意書」の下段に、住所、氏名、日付を、**検査を受ける方自身がご記入**ください。お客様控えをご自身で保管いただき、1枚目のジェノニクス返信用紙を検体と共に郵送ください。

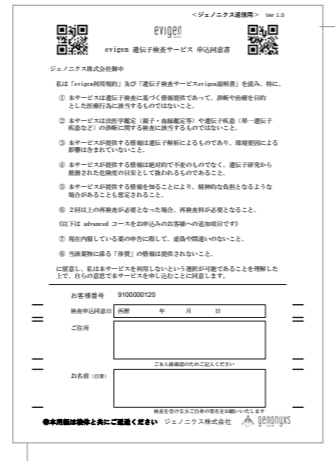



evigen 遺伝子検査サービス 申込同意書

## 2. 検体(唾液)採取

evigen 検査のための検体として、ご自身の唾液を付属の Oragene® 唾液採取キットを使って、採取してください。


### 唾液採取の注意点

- ・唾液を採取する30分前から、「飲食(ガムなど含む)」「歯磨き」「うがい」「喫煙」等はしないでください。
- ・採取キット(チューブ)のラベルに採取日と氏名をご記入ください。
- ・漏斗のフタについているプラスチックフィルムははがさないでください。
- ・Oragene溶液が目や皮膚に付着した場合は、大量の水で洗い流してください。また、飲み込んだりしないでください。
- ・使い終わった容器などは各自治体の規則に従い廃棄してください。

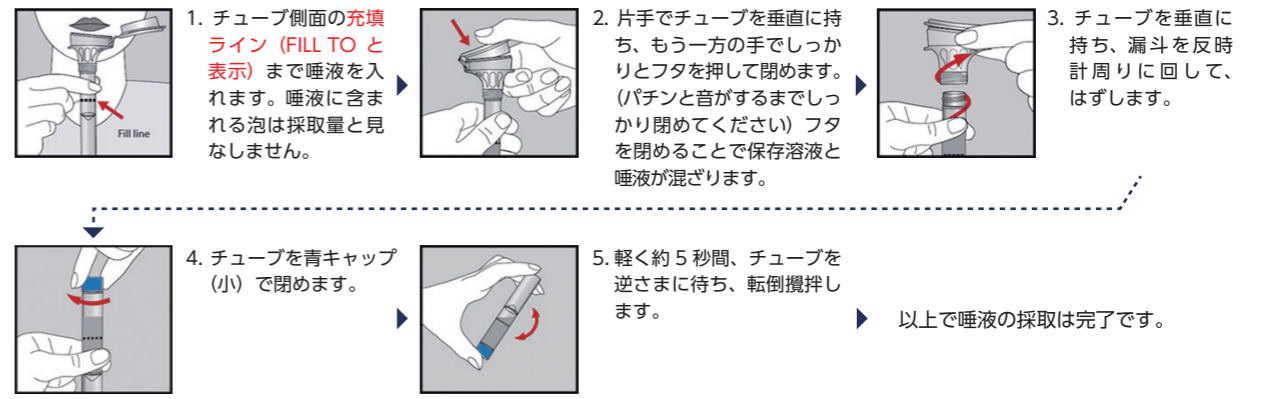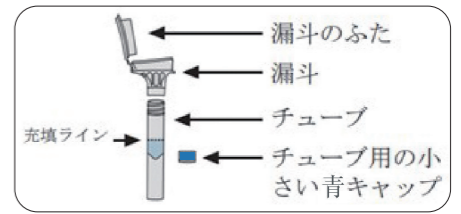

## 3. 返送

採取した唾液の入ったチューブを梱包用ビニール袋に入れて、①でサインした同意書の返信用紙と共に、返送用封筒に入れて、郵便にて返送してください。(送料は不要です)

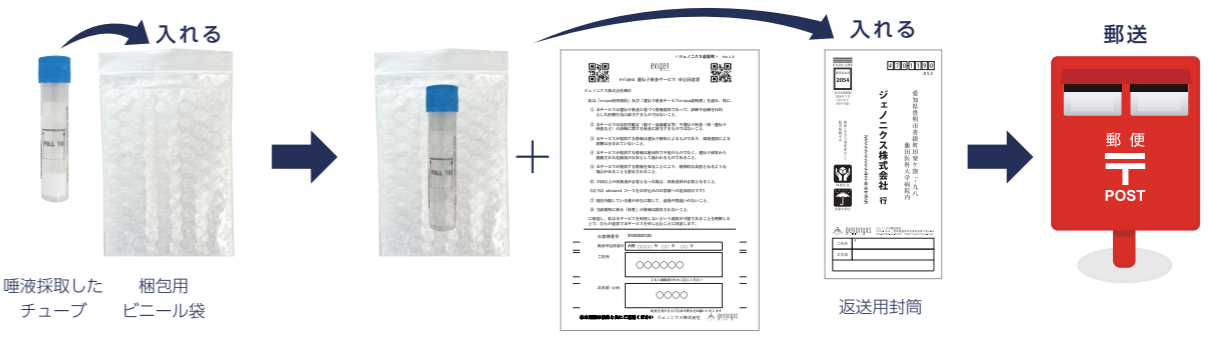

1. 唾液を採取したチューブのキャップをしっかりと閉め、梱包用のビニール袋に入れ、しっかりとジッパーを閉めてください。
2. チューブを入れたビニール袋と一緒に、サインしていただいた同意書(1枚目)を、返送用封筒に入れてください。
3. 封筒の封は、セロハンテープ等でしっかりと閉じてください。
4. 郵便として、投函してください。

## 4. 結果確認

ご返送いただいた唾液から、DNA抽出などの生化学処理、塩基配列決定などのバイオ・インフォマティクス解析処理を行い、検査結果を作成いたします。解析が完了しましたら、ご登録いただいたメールアドレスに解析完了のお知らせをメールでお送りいたします。  
※それまではマイページの閲覧はできません。

解析には、2~3カ月のお時間を頂戴しております。メールが届きましたら、インターネットのマイページ上で、ご自身の結果をご確認いただけます。

